

Chłodzący plaster przeciwbólowy, hydrożelowy

Zyskaj ulgę i długotrwały komfort dzięki naszym chłodzącym plasterom hydrożelowym! Połączenie mentolu i hydrożelu zapewnia skuteczne chłodzenie, które przynosi ulgę w bólach pleców, stawów i mięśni. Pomaga zmniejszyć sztywność i napięcie mięśni oraz ścięgien. Dzięki miękkiej włókninie i delikatnemu klejowi plastry są łatwe w aplikacji, dobrze przylegają i zapewniają maksymalną skuteczność. Komfortowy materiał sprawia, że noszenie jest dyskretne i przyjemne przez cały dzień.

Sposób użycia:

Oczyść i osusz miejsce aplikacji, a następnie przyklej plaster na wybrane miejsce. Pozostaw na maksymalnie 8 godzin.

Zawsze używaj tylko 1 plastra, nie więcej niż 2 dziennie, przez maksymalnie 7 dni.

Ponowne zastosowanie w tym samym miejscu zaleca się po 7–14 dniach przerwy.

Dzieci poniżej 12 lat mogą używać plastra tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Kobiety w ciąży i karmiące mogą stosować plaster wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Przerwij stosowanie plastra i skonsultuj się z lekarzem, jeśli:

- pojawiają się reakcje skórne, takie jak wysypka, swędzenie, zaczerwienienie, podrażnienie, ból, obrzęk lub pęcherze,
- stan się pogarsza lub objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni,
- objawy ustępują i powracają po kilku dniach.

Nie stosować:

- na uszkodzoną skórę,
- z poduszkami grzewczymi,
- w kontakcie z błonami śluzowymi, zwłaszcza z oczami,
- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik.

Skład: Oczyszczona woda, Gliceryna, Mentol, Hialuronian sodu, Glukozamina-chondroityna, włóknina, substancja klejąca.

Tylko do użytku zewnętrznego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyrób medyczny.

Przechowywanie: Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych, mrozu ani nadmiernej wilgotności. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25 °C.

Rozmiar plastra: 7 × 10 cm **Zawartość opakowania:** 2 plastry

Producent: Zhengzhou Yupintang Medical Instrument Co., Ltd., No. 27, Fenglin Road, High-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou City, prowincja Henan, Chiny

Przedstawiciel w UE: Evertbiz GmbH, Landsberger Str. 155, 80687 Monachium, Niemcy

Dystrybutor w Czechach: F.group partner, s.r.o., Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice, Czechy, e-mail: fggroup@fggroup.cz

Dystrybutor na Słowacji: Fazzini group, a.s., Bulharská 42, 917 01 Trnava, Słowacja, e-mail: fazzini@fazzini.sk

Strona www: www.fortepatch.com

Certyfikowany znakiem CE. Wyrób medyczny.