

## **Plaster łagodzący bóle menstruacyjne – Ziołowy skład dla skutecznej ulgi**

Plastry zostały opracowane tak, aby dzięki połączeniu ekstraktów ziołowych skutecznie łagodziły bóle i skurcze towarzyszące cyklowi menstruacyjnemu. Zapewniają głęboką terapię ciepłą nawet do 8 godzin. Wygodny kształt gwarantuje relaks i komfort przez cały dzień.

### **Sposób użycia:**

Oczyść i osusz skórę w miejscu aplikacji.

Usuń folię ochronną i przyklej plaster w wybrane miejsce.

Pozostaw na maksymalnie 8 godzin.

Na to samo miejsce stosuj najwyżej 1 plaster dziennie, maksymalnie przez 7 dni.

Dzieci poniżej 12 lat mogą stosować plaster wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Kobiety w ciąży i karmiące mogą używać tylko po konsultacji z lekarzem.

### **Przerwij stosowanie plastra i skonsultuj się z lekarzem, jeśli:**

- pojawią się reakcje skórne (wysypka, swędzenie, zaczerwienienie, podrażnienie, ból, obrzęk lub pęcherze),
- stan się pogarsza lub objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni,
- objawy ustępują, a następnie powracają po kilku dniach.

### **Nie stosować:**

- na uszkodzoną skórę,
- razem z poduszką grzewczą,
- w kontakcie z błonami śluzowymi, zwłaszcza z oczami,
- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik.

**Skład:** Paeonia Suffruticosa, Leonuri Herba, Chuanxiong Rhizoma, Angelicae Sinensis Radix, Angelicae Dahuricae Radix, Zingiberis Rhizoma, Carthami Flos, Proszek żelazny, Węgiel aktywny, Sól nieorganiczna, włóknina, substancja klejąca.

Tylko do użytku zewnętrznego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyrób medyczny.

**Przechowywanie:** Nie wystawiać na działanie słońca, mrozu ani nadmiernej wilgotności.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25 °C.

**Rozmiar plastra:** 10 × 8 cm      **Zawartość opakowania:** 2 plastry

**Producent:** Zhengzhou Yupintang Medical Instrument Co., Ltd., No. 27, Fenglin Road, High-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou City, prowincja Henan, Chiny

**Przedstawiciel w UE:** Evertbiz GmbH, Landsberger Str. 155, 80687 Monachium, Niemcy

**Dystrybutor w Czechach:** F.group partner, s.r.o., Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice, Czechy, e-mail: fgroup@fgroup.cz

**Dystrybutor na Słowacji:** Fazzini group, a.s., Bulharská 42, 917 01 Trnava, Słowacja, e-mail: fazzini@fazzini.sk

**Strona www:** www.fortepatch.com

**Certyfikowany znakiem CE. Wyrób medyczny.**