

Rozgrzewający plaster z kapsaicyną i proszkiem ceramicznym Far Infrared

Unikalne połączenie ekstraktów ziołowych starannie dobranych zgodnie z zasadami tradycyjnej medycyny chińskiej. Działanie zostało wzmocnione innowacyjnym składnikiem – proszkiem ceramicznym Far Infrared, który wspomaga długotrwałe działanie wszystkich składników i przynosi tymczasową ulgę w bólu. Rozgrzewające plastry zawierają kapsaicynę, korzeń chuanxiongu, piwonię, cynamon, imbir, goździki, mirrę, kamforę i mentol, które zapewniają długotrwałą ulgę w bólu pleców, stawów i mięśni. Skutecznie łagodzą sztywność lub przeciążenie mięśni i ścięgien.

Sposób użycia: Oczyszczyć i osuszyć miejsce aplikacji. Zdjąć folię ochronną i przyłożyć plaster do wybranego miejsca. Na bolące miejsce nałożyć zawsze 1 plaster, nie więcej niż 2 dziennie, przez maksymalnie 7 dni. Kolejną aplikację w tym samym miejscu można przeprowadzić po 7–14 dniach przerwy. Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 12 lat. Kobiety w ciąży i karmiące mogą używać tylko po konsultacji z lekarzem.

Natychmiast przerwać stosowanie plastra i skonsultować się z lekarzem, jeśli:

- wystąpi reakcja skórna, taka jak wysypka, swędzenie, zaczerwienienie, podrażnienie, ból, obrzęk lub pęcherze,
- stan się pogarsza lub objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni,
- objawy ustępują, ale powracają po kilku dniach.

Nie stosować plastra:

- na uszkodzoną skórę,
- razem z poduszką rozgrzewającą,
- w kontakcie z błonami śluzowymi, zwłaszcza oczami,
- w przypadku znanej nadwrażliwości na którykolwiek składnik.

Skład: Far Infrared Ceramic Powder, Chuanxiong rhizoma, Paeoniae radix rubra, Paeoniae radix alba, Cinnamomi cortex, Zingiberis rhizoma, Caryophylli flos, Olibanum, Myrrha, Borneol, Camphor, Menthol, Capsicum Extract, substancja klejąca.

Tylko do użytku zewnętrznego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyrób medyczny.

Przechowywanie: Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych, mrozu ani nadmiernej wilgotności. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25 °C.

Wymiary: 12 × 18 cm **Zawartość opakowania:** 1 szt. plastra

Producent: Zhengzhou Yupintang Medical Instrument Co., Ltd., No. 27, Fenglin Road, High-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou City, prowincja Henan, Chiny

Przedstawiciel w UE: Evertbiz GmbH, Landsberger Str. 155, 80687 Monachium, Niemcy

Dystrybutor w Czechach: F.group partner, s.r.o., Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice, Czechy, e-mail: fgroup@fgroup.cz

Dystrybutor na Słowacji: Fazzini group, a.s., Bulharská 42, 917 01 Trnava, Słowacja, e-mail: fazzini@fazzini.sk

Strona www: www.fortepatch.com

Certyfikowany znakiem CE. Wyrób medyczny.